

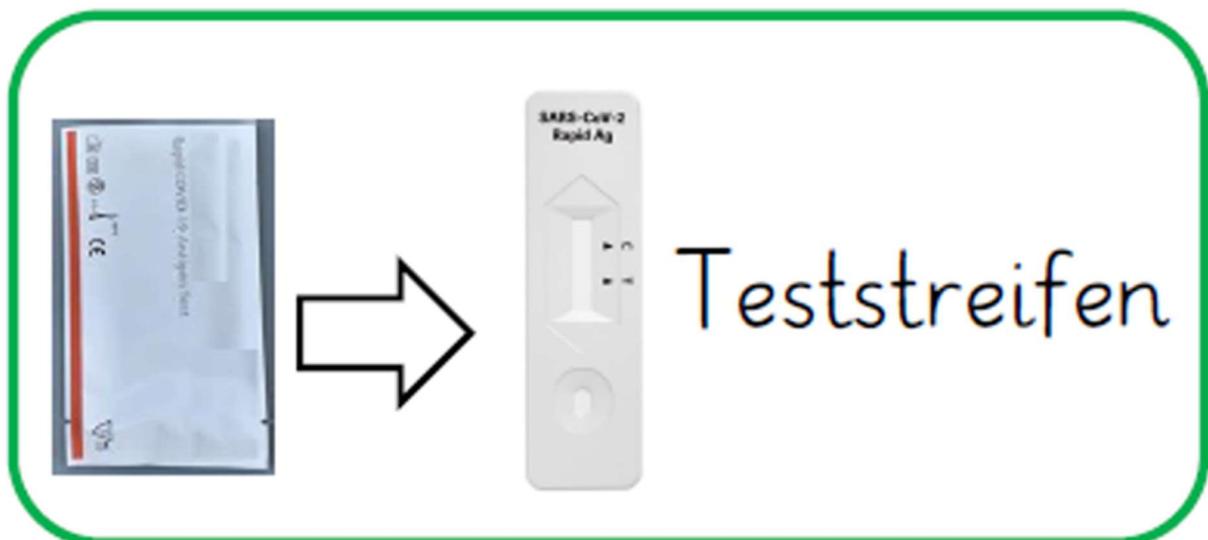


Selbsttest der Firma Siemens

Das brauchen wir!

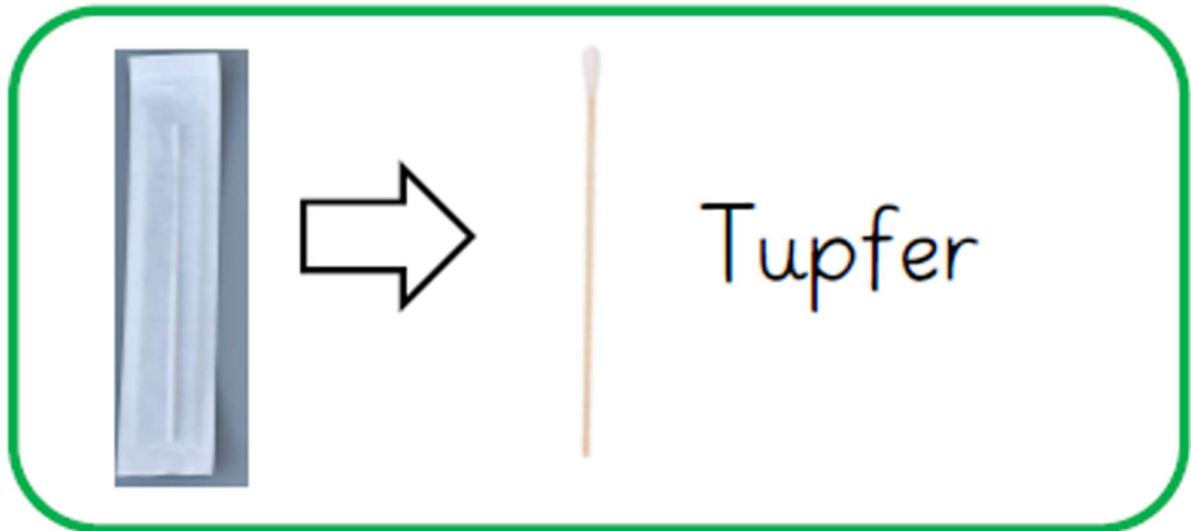


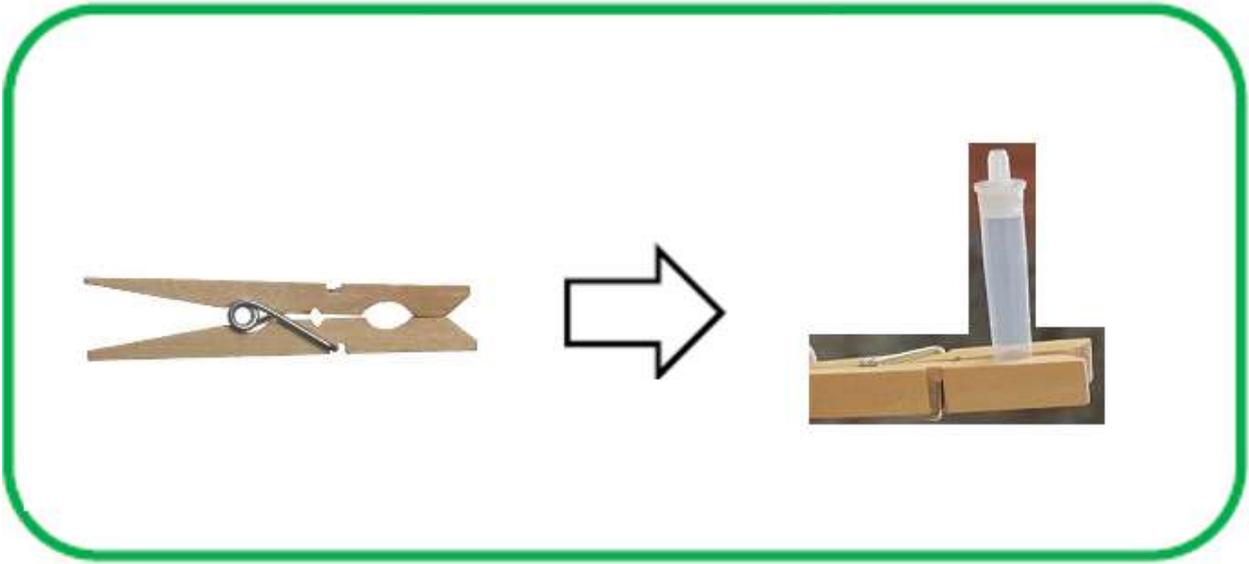

1) Hände waschen!



2) Tupfer auspacken!

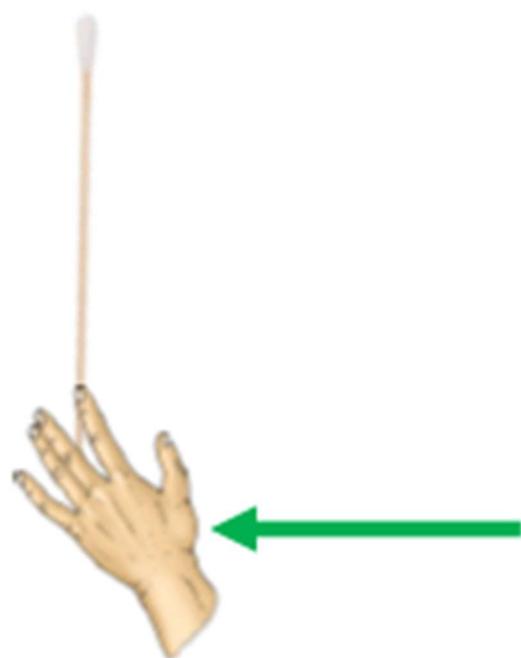

unten
anfassen

3) Tupfer in der
Nase drehen



2 – 4 cm




5mal drehen



5mal drehen

4) Tupfer im Röhrchen drehen!

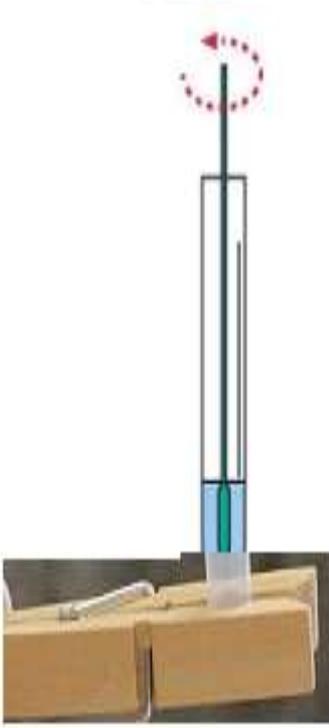

1. mindestens 6mal drehen




2.  1 Minute warten

3.  gegen Boden und Innenwand drücken



5) Tupfer rausholen

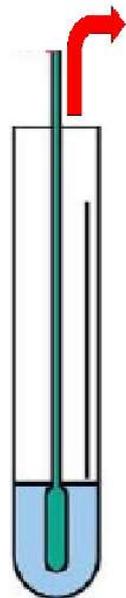


6) Röhrchen schließen!



7) Auf den Teststreifen
tropfen!




8) Warten

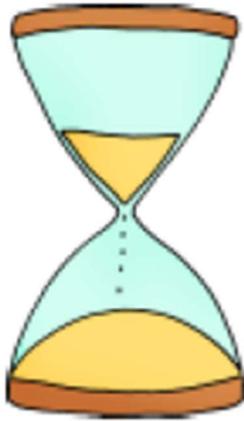

**15
Minuten**


9) Ergebnis ablesen

positiv

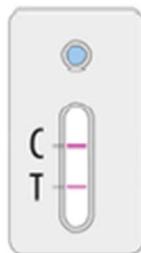


Beide Linien
sichtbar

negativ

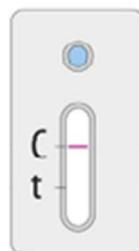

Nur Linie C
sichtbar

ungültig

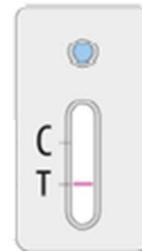

Nur Linie T
sichtbar